

PROTOCOLO OPERACIONAL PADRÃO




CIS-URG
O E S T E



SAMU
192

DESINFECÇÃO DA TENDA DE OXIGÊNIO E CAPACETE (HOOD)

 <p>NEP NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE CIS-URG 192</p>	<p>POP ASSISTENCIAL</p> <p>DESINFECÇÃO</p> <p>001</p>	<p>ELABORAÇÃO:</p> <p>Dra. Michelle Tibúrcio Lopes Rodrigues Cota Médica do NEP</p> <p>Cleverson Humberto de Sousa Silva Coordenador do NEP</p>	<p>REVISÃO:</p> <p>Dra. Maísa Mara Lopes Macedo Breves Enfermeira do NEP</p> <p>Jeovana Elisa Macedo Técnica de enfermagem no Cis-Urg Oeste</p> <p>Dr. Marco Aurélio Lobão Mendes Diretor Técnico</p>
--	--	--	---

DESINFECÇÃO DA TENDA DE OXIGÊNIO E CAPACETE (HOOD)

Objetivo:

Este protocolo tem como objetivo orientar os colaboradores que atuam na intervenção sobre a desinfecção e limpeza da TENDA DE OXIGÊNIO E CAPACETE (HOOD).

Equipe Responsável:

Enfermeiro (a), técnico (a) de enfermagem e médico (a).

Conduas:

1. Lavar a tenda de oxigênio e/ou capacete em água e sabão/detergente neutro;
2. Enxaguar abundantemente em água corrente;
3. Secar todas as partes com compressas não estéreis;
4. Armazenar adequadamente após a secagem completa.

NÃO UTILIZAR DESINFETANTES QUE CONTENHAM ABRASIVOS, ÁLCOOL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU PRODUTOS A BASE DE CLOREXIDINA.

Orientações Importantes:

- Realize sempre a desinfecção imediatamente após o uso;
- Guarde o equipamento desmontado e protegido em bolsa específica para seu armazenamento.
- Se o equipamento não for utilizado em até sete dias após a última desinfecção, faça uma nova e completa desinfecção antes do uso.

Dra. Michelle Tibúrcio Lopes Rodrigues Cota
Médica do Núcleo de Educação
Permanente - CIS-URG OESTE
CRM-MG 76716

Jeovana Elias Macedo
Técnica de Enfermagem
CIS-URG OESTE SAMU 192
COREN-MG 576647

Dra. Máisa Mara Lopes Macedo Breves
Enfermeira do Núcleo de Educação
Permanente - CIS-URG OESTE
COREN-MG 394027

Dr. Marco Aurélio Lobão Mendes
Diretor Técnico
CIS-URG OESTE SAMU 192
CRM-MG 28411

Cleverson Humberto de Sousa Silva
Coordenador do Núcleo de Educação
Permanente - CIS-URG OESTE
COREN-MG 224448



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA GERENCIAMENTO
DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – CIS-URG OESTE

www.cisurg.oeste.mg.gov.br

(37) 3690-3200 - CNPJ: 20.059.618/0001-

